

## ULTRAGARSINIS VEIDO PRIEŽIŪROS APARATAS (HS-3003L)



Šis prietaisas HS-3003L skirtas patenkinti specialistų poreikius, atliekant veido priežiūros procedūras.

25 000 mikro vibracijų per sekundę pagalba, ultragarsinis prietaisas padeda pasiekti gerų odos valymo rezultatų.

O 3MHz dažnis pagerina kosmetinių priemonių įsiskverbimą į veido odą, taip suteikdamas daug veiksmingesnį rezultatą.

### **A: Įjungimo / išjungimo mygtukas**

Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Dar kartą spustelėję, pasirinkite mentelės ar ultragarso režimą.

### **B: Srovės stiprumo nustatymas**

Šio mygtuko pagalba pasirinkite intensyvumo lygį ( žemas, vidutinis ar aukštas).

### **C: Start / pauzė**

Įjungę prietaisą, pasirinkę ultragarso ar mentelės režimą, paspauskite Start mygtuką. Dar kartą spustelėjus – sustabdysite, palaikius 3s grįžtate į pradinę padėtį.

### **D: Pulsavimo režimas**

Pasirinkite pulsavimo ar tolygųjį režimą.

### **E: LED apšvietimas**

Pasirinkę ultragarso režimą, paspaudę šį mygtuką, galite pasirinkti ar dirbsite su LED apšvietimu ar be jo. Paspaudus + galite rinktis LED spalvą.

## **F: Laiko žymeklis**

Laiko ekrane rodomas laikas kiek lieka iki procedūros pabaigos.

## **Naudojimas:**

### **Mentelė**

1. Nuvalykite makiažą ir masažuojamos odos paviršių.
2. Užpurkškite valomojo skysčio ar vandens ant veido.
3. Paspauskite įjungimo mygtuką, tada start mygtuką ir pasirinkite srovės stiprumą.

mentelę laikykite 30-45 laipsnių kampu ir švelniai spaudžiant žemyn, lėtai braukti odos paviršiumi.

### **Ultragarsas**

Nuvalius veidą, užtepti odos priežiūros produktą.

Paspaudus įjungimo mygtuką, pasirinkite ultragarso režimą. Spauskite Start mygtuką, o tada nustatykite srovės stiprumą. Paspaudus + įjungsite LED apšvietimą ir jo spalvą. Paspaudus – išjungsite LED apšvietimą.

Ultragarsas skysčius (serumus, koncentratų ir net kremus) skaido į vis mažesnius lašelius, kol jie pasiekia mikrolašelių dydį. Taip jie geriau, giliau ir greičiau įsigeria į odą.

Nenaudoti ultragarso ant sausos odos. Jei produktas įsigėrė, sustokite.

### **Srovės stiprumo ir pulsavimo režimas**

Tolygus režimas naudojamas vidutiniu arba aukštu srovės stiprumu, kasdienei odos priežiūrai.

Jautriai odai naudojamas pulsuojantis režimas žemu srovės stiprumu.

### **Laiko nustatymas**

Nustatykite procedūros laiką nuo 5 iki 30 min (6 intervalai). Pasirinkę laiką, užfiksuokite jį paspaudę įjungimo mygtuką.

### **Vandeniui atsparios plėvelės naudojimas**

Vandeniui atspari plėvelė yra naudojama, kad apsaugoti mentelę nuo skysčių patekimo į ją. Taip mentelė bus tinkama naudoti ilgesnį laiką. Apsauginę plėvelę klijuokite ant metalinės dalies, kuo arčiau guminio laikiklio ir pirštais stipriais prispauskite.

### **Dėmesio!**

1. Nenaudoti šio prietaiso vonioje ar kitose drėgnose patalpose.
2. Griežtai draudžiama trankyti, mėtyti ar bandyti lankstyti prietaisą.

3. Jeigu ultragarsas sukelia nepatogumus akims ar kitoms jautrioms vietoms, nustokite jį naudoti ar darykite pertraukas.
4. Venkite aparato srovės stiprumo kaitos procedūros metu, nes prietaisas gali nudeginti ar kitaip sužaloti odą.
5. Siūlome procedūros metu judesius atlikti sukamaisiais judesiais vietoje stipraus spaudimo probleminėse vietose.
6. Naudoti esant 10°C ~ 40°C temperatūrai.
7. Žemiau išvardintos sąlygos, kuriom esant reiktų pasitarti su daktaru arba nenaudoti:
  - Labai padidėjęs kraujospūdis;
  - Užkrečiamos odos infekcijos;
  - Hemangioma, herpesas, odos opa;
  - Piktybinis auglys;
  - Menstruacijos;
  - Nėštumas.
8. Vengti ilgo prietaiso naudojimo, nes pavargsta raumenys. Rekomenduojama daryti pertraukas po 15~20 minučių.
9. Kai aparato mentelė šalta, gali būti girdimas ne itin žymus garsas. Leiskite mentelei sušilti ir garsas turi dingti, jeigu taip neatsitiko, kreipkitės į mūsų kompaniją.
10. Kai mentelė yra netoli ausies yra girdimas stiprus garsas, jeigu tai sukelia nepatogumo, naudokite ausų kaištukus garsui sumažinti.